

Descriptif du bracelet d'appel et détection de chute INTERFASSE

Le bracelet d'appel sécurisé INTERFASSE se fixe au poignet de votre choix comme une simple montre.



Bracelet d'appel détection de chute avec son capteur récepteur radio, se connecte sur tous systèmes d'appel malade (Sortie NO ou NF, alimentation interne).
Module universel.

Caractéristiques techniques :

- Poids : 50 g
- Résistant à l'eau, IP67
- Nettoyage : eau et savon uniquement
- Plasturgie : hypoallergénique
- Fréquence radio : 869.2125 MHZ / 869.2375 MHZ
- Portée radio : 200m en champs libre
- Température de fonctionnement : + 5°C – + 40°C

Les types d'alarmes :

Alarmes manuelles :

- Déclenchement par appui sur le bouton poussoir

Alarmes automatiques :

- Dans le cas où le bracelet d'appel détection de chute INTERFASSE détecte une chute, le système déclenchera automatiquement une alarme.
- Surveillance du lien radio entre le bracelet et la base.

Vibreur :

- Avant tout envoi d'alarme automatique à la base, le bracelet d'appel détection de chute INTERFASSE se met à vibrer pendant environ 25 secondes par intermittence. Durant cette période, si l'utilisateur ne souhaite pas que l'alarme soit envoyée, il suffit qu'il bouge le bras. L'envoi de l'alarme sera alors annulé.

Le bracelet d'appel détection de chute INTERFASSE doit être porté au poignet en permanence. Toute autre utilisation peut engendrer des fausses alarmes.

Exemples de chutes types :

Etat d'inconscience et immobilité suite à une chute lourde ou une perte d'équilibre nette qui se produit dans la vie quotidienne dans la salle de bain, au lever du lit ou lors de tout déplacement dans l'habitat (pour se coucher, s'asseoir, manger, marcher, lire, monter/descendre des escaliers, etc...).

NB : Il se peut que certaines chutes ne soient pas détectées par le bracelet d'appel détection de chute INTERFASSE.

Les technologies de détection de chute sur lesquelles sont basées la solution (accéléromètre) ne permettant pas d'analyser/interpréter toutes les situations.

NB : En cas de non détection de chute, le porteur peut à tout moment déclencher manuellement l'alarme en appuyant sur le bouton poussoir.

◇ La solution **INTERFASSE** réintroduit de l'humain au service des patients résidents grâce au meilleur de la sécurité à faible coût.

Nos solutions sont simplifiées, c'est votre meilleur atout prix, fiabilité, services...

N'hésitez pas à nous questionner afin de découvrir aujourd'hui ce que d'autres imagineront demain.

Consultez-nous afin de constater l'évolution et l'attractivité de nos offres !!! ETUDES, INGENIERIE ET DEVIS GRATUITS... .. www.interfasse.fr Venez découvrir l'ensemble de nos produits....